



新型コロナウイルスワクチンを接種された方へ



中和抗体検査キット

新型コロナウイルスワクチン
接種後の確認を

ワクチン接種の効果があつたのか知りたい
新型コロナウイルスに現時点で免疫力があるか知りたい

販売
価格 **2,530円** (税込)




まとめて買って更にお得♪
是非、お問い合わせください。

ワクチン接種により生産される「中和抗体」とは？

ウイルスがヒトの細胞へ侵入しないように防ぐ抗体のことで、ウイルスの感染能力を失わせる力があります。この中和抗体は感染後やワクチン接種後に反応して発現しその後ウイルスに結合して感染を阻止するとされています。ワクチン接種の前後に使用することでワクチンの有効性を調べることが出来ます。

中和
抗体検査
キット

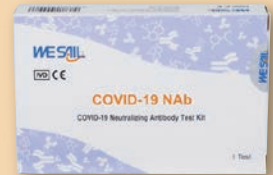

正診率
97.9%

指先の血液
からの検査

15分
で判定

「中和抗体検査キット」の内容と使用方法について

商品内容



小分けの袋に入れて
お送りします。
箱付は10キットから



- ① テストキット
- ② スポイト
- ③ 検体希釈液
- ④ 取扱説明書(日本語)
- ⑤ 採血針(滅菌済みランセット)
- ⑥ 消毒綿

採血方法

針の特徴
使いやすさ・痛みの軽減・安全性を追求
先端を押し当てるだけ、失敗が少ない構造
独自の刃面構造(アシンメトリイェッジ)で痛みを軽減



1. 手首から指先に向けてマッサージしてください。
2. 採血部位の指先を消毒綿でよく拭き、よく乾かしてください。
3. 指先を固定し、採血針をあて、強く押します。
4. 出血した指の上下を挟み、指の付け根から指先方向へ押し出し、血液を溜めます。

検査方法


判定時間5分 誰でも簡単に検査ができます



1 検体の採取
指先から採取する場合



2 検体の注入
テストキットのウェルに検体を
1滴 滴下します。

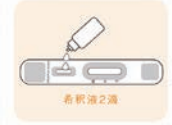

3 希釈液の注入
テストキットのウェルに希釈液を
2滴 滴下します。



4 結果の確認
15分後に目視で結果を確認して
ください。
※採血時の痛感や出血は軽減されています。

※検査のタイミングについて

基本的にはワクチン2回目の接種を終えて1週間後、もしくはそれ以降のタイミングで検査



株式会社テラ 衛生事業「&SHIELD」
<https://andshield.jp/>
 TEL : 03-6432-0830 Email : info@andshield.jp
 営業時間 : 9:00 - 18:00 (土日祝日を除く)

その他の衛生管理商品もご用意しております。
詳しくは「&SHIELD」のWEBで検索！

